

Manuel d'utilisation



Table Luxe V2

Malea[®]



www.malea-massage.com



@maleamassageshop



@malea.massage.shop

Cher(e) Client(e),

nous sommes ravis de vous compter parmi les nombreux utilisateurs de notre matériel et souhaitons de tout coeur que votre table Luxe V2® vous apporte entière satisfaction.

Vous trouverez dans ce manuel les caractéristiques techniques de la table ainsi que différentes instructions relatives à son installation et son utilisation.

Nous vous invitons à le conserver et à suivre ces recommandations afin d'assurer à votre table Luxe V2® une longue durée de vie.




Pour toute question relative à ce manuel, nous vous invitons à contacter le Service Technique Malea :

par téléphone : 05 67 68 68 76

par email : sav@malea-massage.com



Caractéristiques détaillées

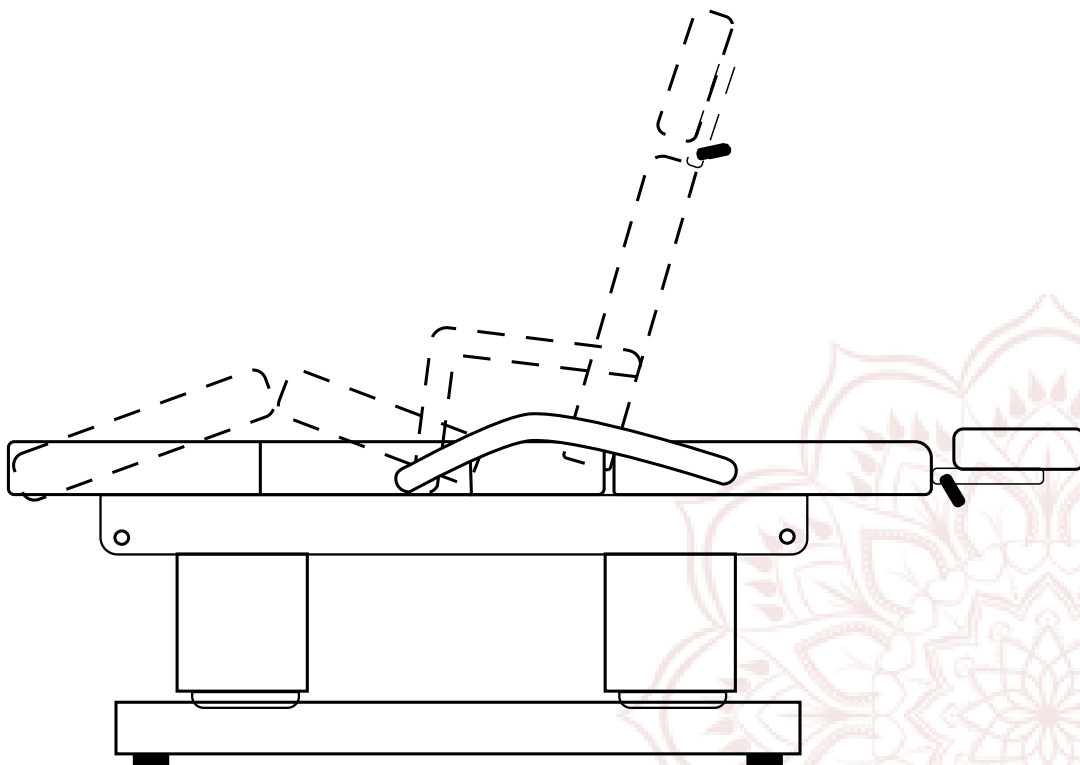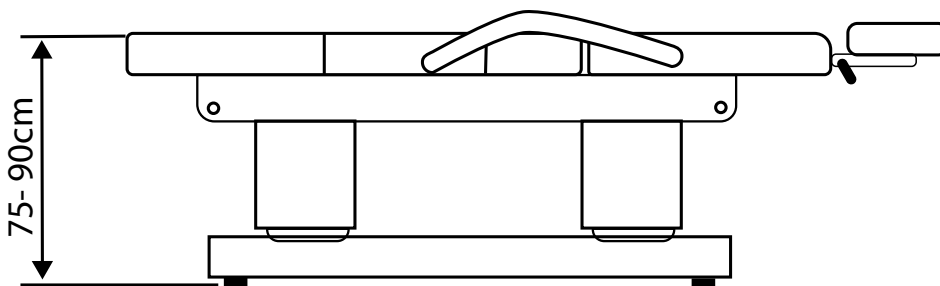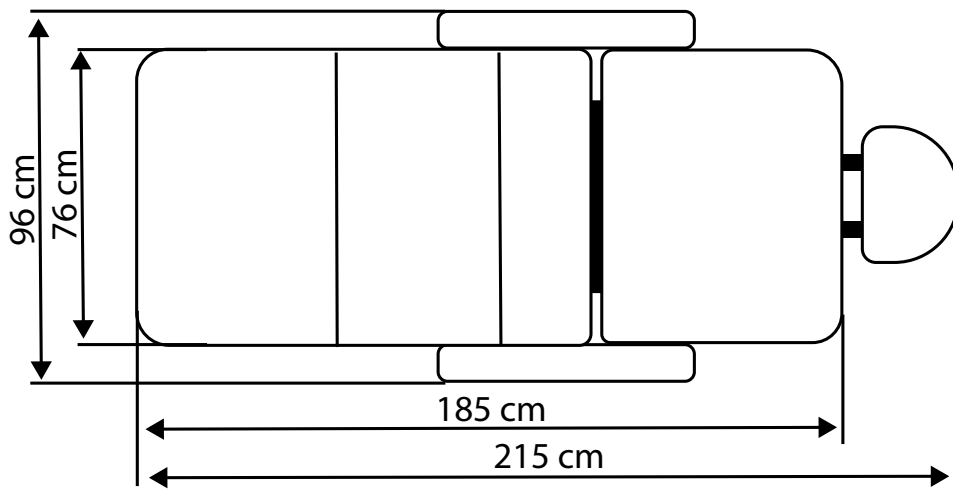

Dimensions : 185 x 76 x 75 cm

Hauteur (au plus bas) : 75 cm

Hauteur (au plus haut) : 90 cm

Poids net : 100 kgs

Charge maximale supportée : 150 kgs

Branchement électrique : AC 100~130V/220~240V 50/60Hz


Puissance électrique (en sortie) : DC 24V




Installation des accessoires





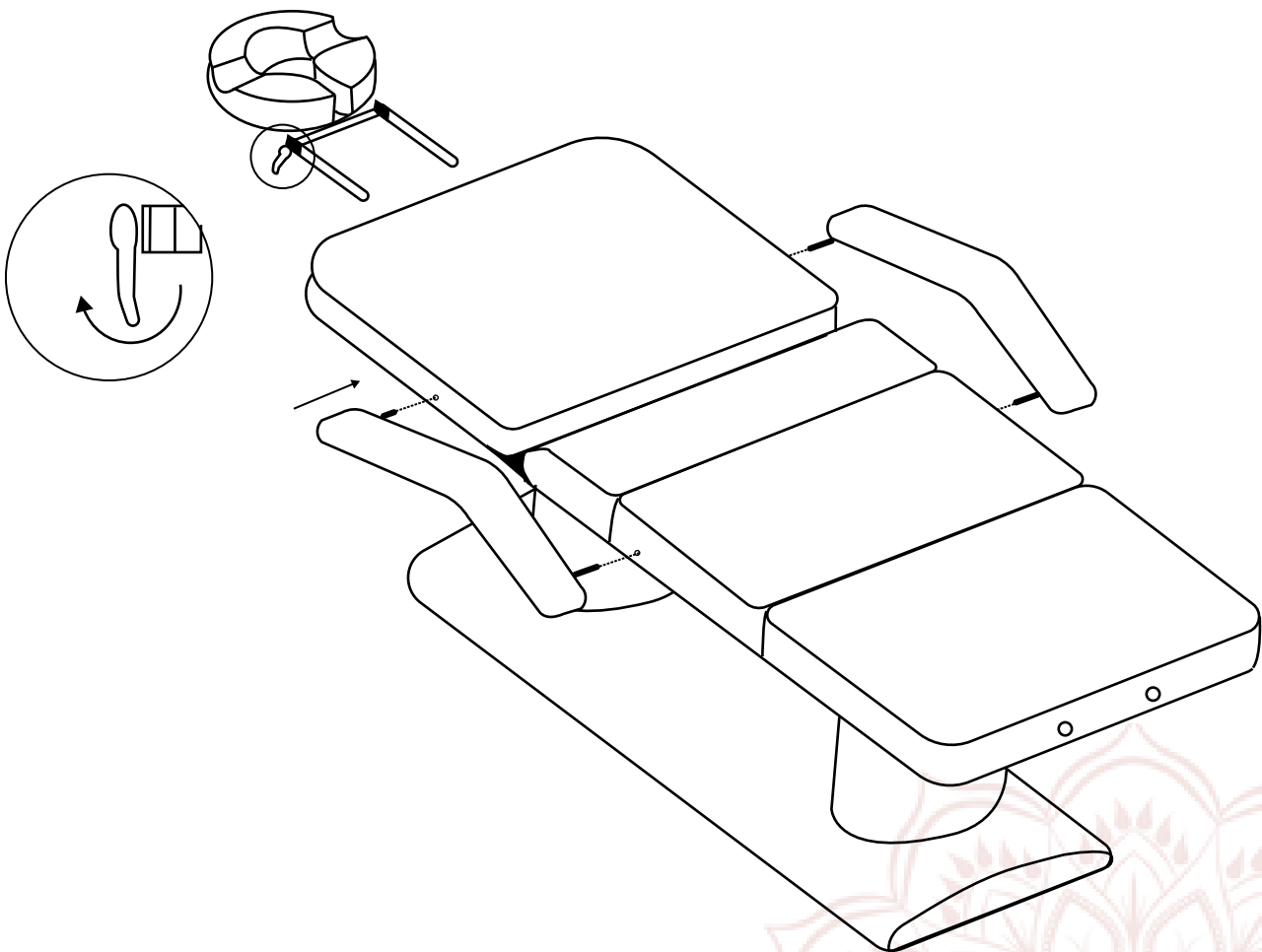



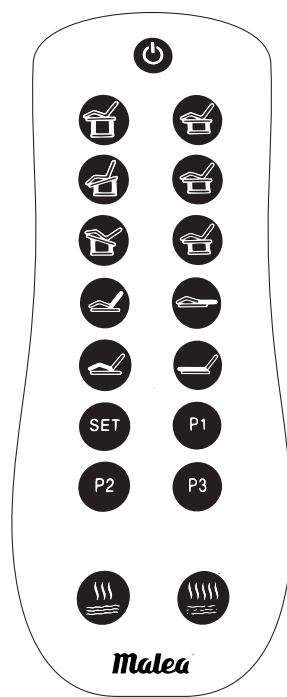







Insérez les tiges métalliques des accoudoirs dans les supports prévus à cet effet de chaque côté du matelas

Insérez les tubes de la tête dans les supports prévus à cet effet en haut du dossier. Levez la manette de réglage, effectuez une rotation à 180° et abaissez-la pour fixer la tête fermement.



Télécommande



- ① Utilisez les touches   pour ajuster la hauteur de la table.
- ② Utilisez les touches   pour incliner la table vers l'avant.
- ③ Utilisez les touches   pour incliner la table vers l'arrière.
- ④ Utilisez les touches   pour ajuster l'inclinaison du dossier.
- ⑤ Utilisez les touches   pour ajuster l'inclinaison du repose-jambes.
- ⑥ Utilisez la touche  pour initier la fonction Mémoire.
- ⑦ Utilisez la touche  pour mémoriser la Position 1.
- ⑧ Utilisez la touche  pour mémoriser la Position 2.
- ⑨ Utilisez la touche  pour mémoriser la Position 3.
- ⑩ Utilisez les touches   pour ajuster la température du matelas.

Fonction mémoire - Utilisation détaillée


Ajustez tout d'abord les différentes sections selon la position désirée : dossier, repose-jambes, hauteur, inclinaison.

Effectuez un appui long sur la touche  pour initier la fonction Mémoire.


Utilisez ensuite les touches ,  ou  pour mémoriser la position désirée.

Fonctions détaillées


Réglage de la hauteur

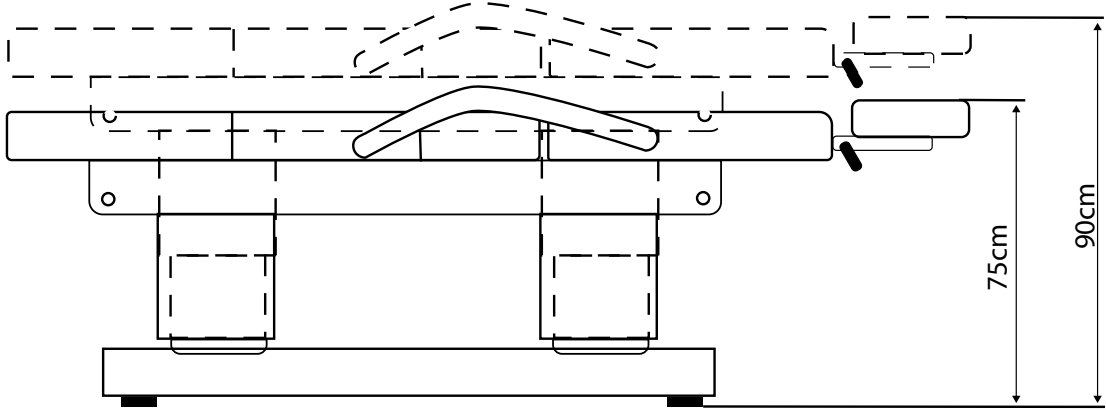


Inclinaison de l'ensemble

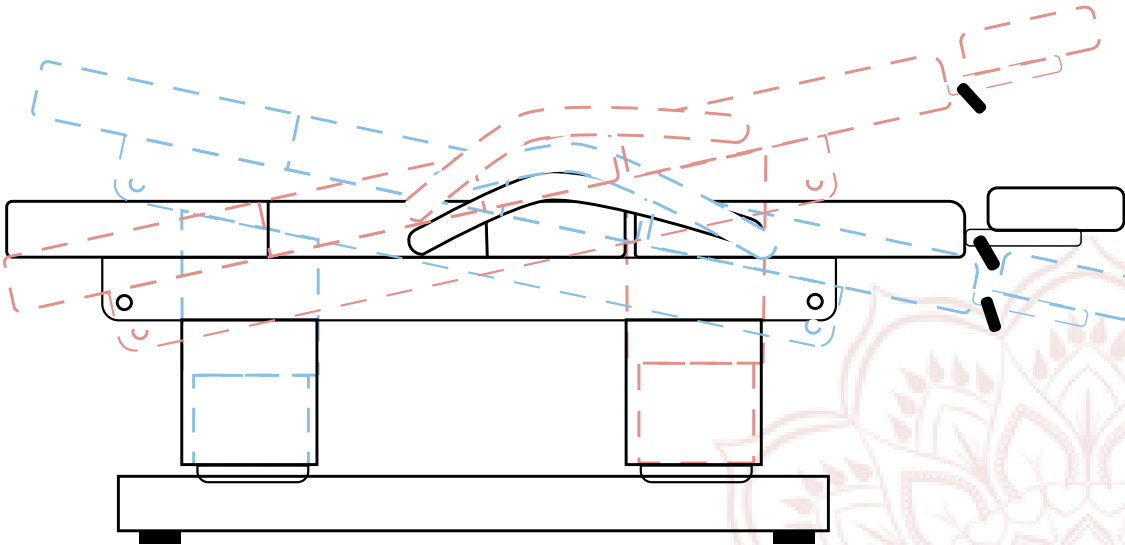

Inclinaison du dossier

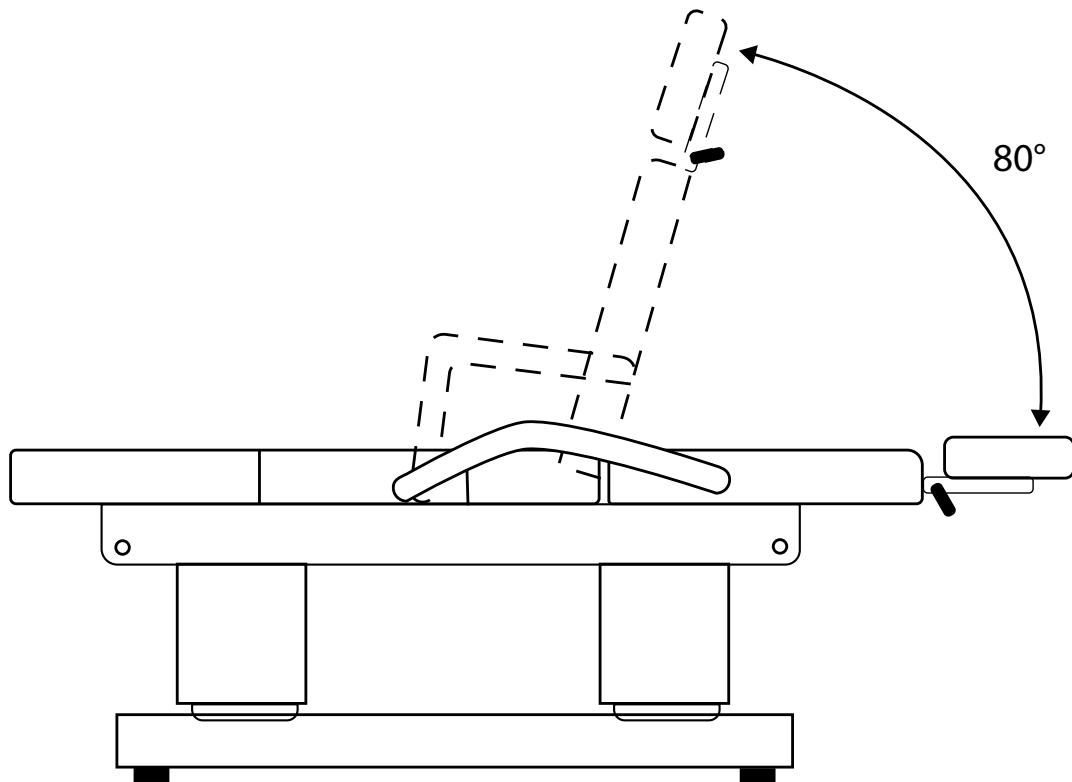

Inclinaison du repose-jambes

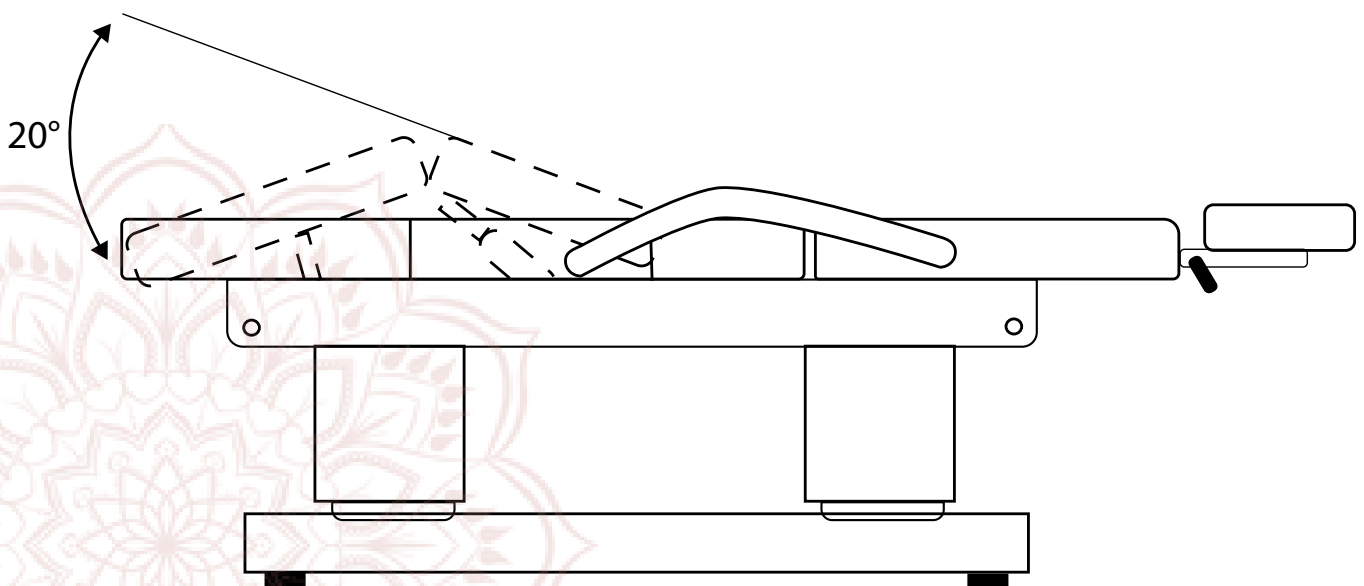

Précautions d'emploi

Un usage inapproprié de la table peut entraîner des blessures.

Les manoeuvres d'inclinaison (dossier, repose-jambes) doivent pouvoir s'effectuer librement (sans poids). Nous vous recommandons de ne pas les réaliser si votre client est adossé ou appuyé sur ces sections.

Nous vous recommandons de ne pas utiliser une table qui serait incomplète, mal assemblée ou dont les vis sont desserrées.

Nous vous recommandons de ne pas retourner la table sans prendre de précautions au préalable.

Lorsque que vous la retournez, assurez vous de la manipuler par la structure bois et non par le matelas.

Nous vous invitons à contrôler le matelas de la table dès l'ouverture du carton. Ne l'utilisez pas si celui-ci présentent des détériorations.

(Notre garantie ne couvre pas les dommages dûs à une mauvaise installation, accident, excès ou une utilisation autre que celle destinée à la table.)

Nous vous recommandons de toujours vérifier que la table soit stable avant d'y installer un patient et de ne jamais s'asseoir sur le dossier ou le repose jambes lorsqu'ils sont inclinés.

Nous recommandons de ne jamais s'asseoir sur les accoudoirs et têtère ou prendre appui dessus.

Une exposition prolongée à de hautes températures peut endommager le vinyle.



Entretien

Afin d'assurer la longévité de votre matelas, nous vous recommandons d'effectuer le nettoyage avec un chiffon doux humidifié avec de l'eau tiède et du savon noir (ou de Marseille).

Tout emploi d'un produit d'usage ménager, potentiellement abrasif, tel que l'alcool, l'eau de javel, ou un produit désinfectant, est à proscrire. Son utilisation peut en effet engendrer à court terme des fissures dans le revêtement.

Votre retour d'expérience

N'hésitez pas à nous faire part de votre expérience en nous identifiant sur nos différents réseaux sociaux ou en utilisant le #maleamassage. Vos retours sont précieux !



@maleamassageshop



@malea.massage.shop

